

Medizid® Alpha+ XXL Desinfektionstücher

Unsere gebrauchsfertige Sprühwischdesinfektion zur Reinigung und Desinfektion von allen Oberflächen von Medizinprodukten, insbesondere für alkoholempfindliche Oberflächen

REF	Versandeinheit	Größe	Eimer / Nachfülltücher	PZN
00969+	70 Tücher	26 x 29 cm	Eimer	16015179
00970+	70 Tücher	26 x 29 cm	Nachfülltücher	16015162



Allgemeine Informationen

Charakteristik

- Gebrauchsfertig
- Alkohol- und aldehydfrei
- Mit entsprechender Sprühkopfeinstellung auch als Schaum auftragbar
- Schnell und umfassend bakterizid, levurozid wirksam, bereits nach 60 sek.
- Wirksam gegen alle behüllten Viren BVDV / Vaccinia (inkl. HCV / HBV / HIV)
- Wirksam gegen die unbehüllten Viren Rota, Polyoma / SV 40
- Gute Reinigungsleistung
- Gute Materialverträglichkeit
- Für Pflegewannen geeignet
- Für empfindliche Oberflächen, wie Acrylglas geeignet
- Geprüft nach den Standardmethoden der DGHM und der RKI-Empfehlungen zur Wirksamkeit gegen Viren

Anwendungshinweise

Für medizinische Einrichtungen, Sanitär- und Bäderbereiche und Pflegeheime. Unverdünnt anwenden, Oberflächen und Gegenstände vollständig benetzen, 1 Minute einwirken lassen. Einwirkzeit : KONZ. / 1 MINUTE.

Zusammensetzung

In 100 g sind enthalten:

0,2 g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid, 0,64 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Haltbarkeit

Medizid® Alpha+ XXL kann bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden. Die Mindesthaltbarkeit beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter standard Lagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.

Allgemeine Hinweise

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit, sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de