

Abformdesinfektion PLUS

Produktinformation

Eigenschaften

- innerhalb von nur **5 Minuten** wirksam! (zusätzliche TB Wirksamkeit nach 15 Min.
- enthält keine Aldehyde, Alkohole oder toxische Inhaltsstoffe -sicher im Gebrauch!
- angenehmer Geruch
- Zulassung als Medizinprodukt

Anwendungsbereiche

Präparat zur Desinfektion aller dentaler Abformmaterialien.

Anwendung

Die betreffende Abformung in die gebrauchsfertige Desinfektionslösung einlegen und nach der empfohlenen Einwirkzeit wieder entnehmen. Die Abformung muss vollständig mit der Lösung bedeckt sein. Alginate und Hydrokolloiden nur kurz eintauchen und abtrocknen lassen.

Die Abformung danach mit Wasser abspülen. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen. Je nach Verschmutzungsgrad ist die Gebrauchslösung zu erneuern (RKI-Empfehlung: Mindestens arbeitstäglich). Nur für professionelle Anwender.

chemisch-physikalische Daten

Dichte: 0,997g/cm³

pH-Wert: 7,4

Artikelnummer Lieferformen

- REF 97-905 5 Liter
- REF 97-910 10 Liter

Lieferant

UNIGLOVES®
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH
Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf

 +49 (0) 2241-9323-0
 unigloves@unigloves.de

Abformdesinfektion PLUS

Produktinformation

Einwirkzeiten

Bakterien (inkl. MRSA) nach VAH, EN 13727, EN 14561 (hohe Belastung)

Konz. 1min.

Candida albicans nach VAH, EN 13624, EN 14562 (hohe Belastung):

Konz. 1min.

"Begrenzt viruzid" (behüllte Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV) nach DVV/RKI und EN 17111 (niedrige Belastung):

Konz. 5min.


TbB (M. terrae im Suspensionstest, niedrige Belastung):

Konz. 15min.

Sicherheitshinweise

H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

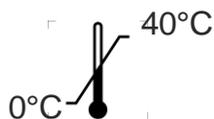

UNIGLOVES GERMANY

Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

📍 Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf
☎ +49 (0) 2241-9323-0
✉ unigloves@unigloves.de
🌐 unigloves.de

