




STERILISATIONSFOLIE

MEDIFIT

SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

Artikelnummer(n): 52100; 52102;
52104; 52106;
52108; 52110

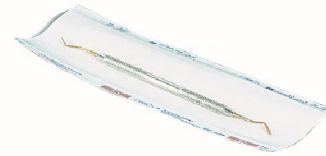

Produktübersicht: Die flachen Rollen der Marke VeriSteril bestehen aus einer Seite mit medizinischem Papier 60g / m² und einer Seite mit Kunststoffolie PET / PP Peel 12/40 µm. Die zertifizierten Materialien bieten eine konstante Dichtheit bei der Sterilisationsphase und eine ausgezeichnete Abziehbarkeit in der Öffnungsphase ohne Freisetzung von Papierfasern oder Schnittwunden aus dem Kunststoffmaterial.
Darüber hinaus heben wir das folgende Feature hervor:
Mehrlinien-Bindenähte sind sehr haltbar und gleichmäßig verteilt.
Die flachen Rollen sind für die Dampf- und EOGAS-Sterilisation geeignet.

Bedienungsanweisung: Die Folien und Beutel dürfen nur im Autoklaven (Steam und EO) zwischen 160 °C und 180 °C sterilisiert werden. Die Nahtverschweißung sollte mit einer Dauer zwischen 0,9 Sekunden und 1,5 Sekunden und einem Druck von 1 – 3 bar erfolgen.

Merkmale:

- mit Dampf- und EO-Gasindikator
- für FO-Sterilisation geeignet
- Rolle à 200 m
- Versandeinheit: 2, 4 oder 8 Rollen

Medizinprodukt: Klasse I

Normenkonformität: Film PET / PP Peel ist konform zur EN ISO 11607 und entspricht der 2006 und 94/62 / EG Richtlinie
Konformität der Komponenten zu den angewendeten Normen:
PET-POLYETHYLEN - EU-Richtlinie 2002/72 / EG, 2004/19 / EG, 2005/79 / EG, 94/62 / EG, 2002/16 / EG, 2007/19 / EG, Verordnung 683/98, 1935/2004 und 1895/2005

Artikelnummer:	52100	52102	52104	52106	52108	52110
Breite:	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm
Versandeinheit:	8 Rollen	8 Rollen	4 Rollen	4 Rollen	2 Rollen	2 Rollen

Rückverfolgbarkeit: Die Rückverfolgbarkeit der Produkte und Rohstoffe wird durch die Dokumentationen der Marke Medifit für einen Zeitraum von 10 Jahren gewährleistet.

Lagerhaltung: Bei einer sachgemäßen Lagerung (mind. +5 bis max.+40 Grad und keiner direkten Sonneneinstrahlung) sind die von uns an Sie verkauften Sterilisationsfolien und -beutel vor der Sterilisation 3 Jahre und nach der Sterilisation 6 Monate (180 Tage) haltbar.